

Benodigdheden

1. Schone binnencanule
2. Gaaskompres

Het verwisselen van de binnencanule is een essentieel onderdeel van de verzorgingsroutine. Dit helpt verstopping te voorkomen, verwijdert slijmproppen en vermindert de kans op mogelijke infecties. Uw binnencanule moet dagelijks en indien nodig, vaker worden uitgenomen voor reiniging.



Voer handhygiëne uit.



Reserveer links een gedeelte voor de materialen die u gaat gebruiken voor het verwisselen van de canule en leg hier een schone binnencanule neer. Dit is de 'schone' kant.

Leg aan de rechterkant een schoon gaaskompres neer. Deze kant gebruiken we als de 'vuile' kant.



Houd de halsplaat op zijn plaats terwijl u de binnencanule uit de buitencanule haalt.



Leg de gebruikte binnencanule op het gaaskompres aan de 'vuile' kant.



Houd de halsplaat op zijn plaats terwijl u de schone binnencanule in de buitencanule plaatst. Zorg ervoor dat de binnencanule vast zit.



Bekijk hier de
instructievideo

Producent:

Tracoe Medical GmbH
Reichelsheimer Straße 1/3
55268 Nieder-Olm, Germany

Atos Medical Benelux
Werner von Siemensstraat 11
1712 PN Zoetermeer
Nederland

Atos Medical BV
Tel. +31 (0)79 593 50 00
info.nl@atosmedical.com
www.atosmedical.nl

Atos Medical BVBA
Tel. +32 (0)2 218 55 50
info.be@atosmedical.com
www.atosmedical.be

©Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden. Atos en het Atos Medical logo zijn handelsmerken van Coloplast A/S.

Disclaimer: De in dit document verstrekte informatie is geen vervanging van de officiële gebruikershandleidingen van de getoonde producten. Raadpleeg altijd uw arts, clinicus of bevoegd zorgverlener voor advies met betrekking tot uw persoonlijke situatie en het gebruik van deze producten.

MC3019 BNL 2023